

DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO

GREENAX 2%

Tên thương mại : GREENAX 2%

Ký mã hiệu sản phẩm : GRN02



Thành phần : Glutaraldehyde 2% (kl/tt)

Tá dược : Hương liệu và nước tinh khiết vừa đủ.

Đặc tính: Thời gian khử khuẩn nhanh 5 phút. Không cần hoạt hóa, trộn hay pha loãng dung dịch.

Dung dịch sử dụng trong vòng 75 ngày sau khi mở nắp.

Dung dịch chứa 2% Glutaraldehyde Diệt hoàn toàn các vi khuẩn Gram âm, Gram dương, Virut, nấm, trực khuẩn lao, bào tử vi khuẩn.

Công dụng: Là dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho các loại dụng cụ y tế thiết yếu sử dụng nhiều lần , các loại dụng cụ chịu nhiệt và không chịu nhiệt, dùng cho các loại dụng cụ nội soi bằng máy rửa, khử khuẩn ống nội soi theo hướng dẫn nhà sản xuất.

Số đăng ký lưu hành : VNDP-HC-051-01-17

Thông tin hướng dẫn sử dụng xem ở trang 2

Thành phần: Glutaraldehyde 2% (kl/kl)

Thành phần khác: Tã được và nước tinh khiết vừa đủ.

Đặc tính: Dung dịch chứa 2% Glutaraldehyde, Diệt hoàn toàn các vi khuẩn Gram âm, Gram dương, Virus, nấm, trực khuẩn lao, bào tử vi khuẩn.

CHỈ ĐỊNH:

- Là dung dịch khử khuẩn mức độ cao cho các loại dụng cụ y tế thiết yếu sử dụng nhiều lần, các loại dụng cụ chịu nhiệt và không chịu nhiệt, dùng cho các loại dụng cụ nội soi bằng máy rửa, khử khuẩn ống nội soi theo hướng dẫn nhà sản xuất.

- Diệt được tất cả các loại vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Mycobacterium bovis, Salmonella choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa,...).

- Diệt được các loại virus có vỏ bọc và không có vỏ bọc (HIV-1, Coronavirus, Cytomegalovirus, Herpes simplex Type 1, 2, Influenza Virus, Poliovirus Type 1, Vaccinia, Rhinovirus Type 42, Coxsackievirus Type B-3, Adenovirus Type 2...).

- Diệt được các loại nấm

- Diệt được tất cả các loại bào tử

CHÔNG CHỈ ĐỊNH:

- Không trộn lẫn dung dịch **GREENAX 2%** với các sản phẩm khác có chứa aldehyde

- Là dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế dùng ngoài, không thấm nhập

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Bước 1: rửa sạch dụng cụ

- Dụng cụ sau khi sử dụng phải xả qua dưới vòi nước chảy.

- Ngâm rửa dụng cụ bằng dung dịch đa enzymes (GREENAXYMES, gồm 5 loại enzyme) để loại bỏ màng biofilm, thủy phân máu và chất bẩn, chất nhầy còn bám dính trên dụng cụ

Bước 2: Trừ khi có chỉ định khác, dung dịch Greenax 2% được sử dụng nguyên chất, không pha loãng

- Ngâm dụng cụ đã tẩy rửa sạch bằng dung dịch đa enzymes và để khô vào khay, nhưng ngập hoàn toàn dụng cụ cần khử khuẩn vào dung dịch Greenax 2% tối thiểu 5 phút.

- Sau lần ngâm dung dịch đầu tiên, dung dịch Greenax 2% được sử dụng khử khuẩn trong vòng 14 ngày. Ghi lại ngày sử dụng đầu tiên và ngày cuối cùng sử dụng.

- Dung dịch tái sử dụng 14 ngày, tuy nhiên còn phụ thuộc vào tần suất sử dụng và mức độ nhiễm bẩn của dụng cụ cần khử khuẩn. Không khuyến cáo sử dụng sau 14 ngày dù dung dịch còn hiệu lực diệt khuẩn khi thử bằng que thử.

- Dung dịch được sử dụng 75 ngày sau khi mở nắp can, sau 75 ngày dù dung dịch chưa sử dụng khi đã mở nắp can được khuyến cáo nên loại bỏ theo quy trình xử lý dung dịch sát khuẩn của Bộ Y Tế.

Bước 3: bảo quản dụng cụ sau khi khử khuẩn:

Tráng lại dụng cụ bằng nước sạch/nước cất. Lau khô (nếu cần) và đem sử dụng.

Thận trọng: Khi sử dụng dung dịch Greenax 2% cần mang đầy đủ găng tay, kính bảo hộ. luôn tuân thủ theo hướng dẫn nhà sản xuất

SƠ CỨU: những lưu ý khi sử dụng sản phẩm và cách xử lý

Tác động xấu có thể xảy ra đối với người khi sử dụng chế phẩm và cách xử lý:

+ Qua da: Gây ngứa, nổi đỏ hoặc có thể gây phỏng rộp hoặc bong tróc da. Xử lý bằng cách ngưng sử dụng và rửa với thật nhiều nước.

+ Đường mắt: Gây đỏ, đau, bỏng. Xử lý bằng cách rửa mắt nhiều lần với nước, sau đó nhỏ dung dịch rửa mắt (nước muối sinh lý).+ Đường thở: Gây rát, đau cổ họng, ho, hơi thở nặng nhọc. Xử lý bằng cách chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu không hồi phục nhanh chóng chuyển nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp.

+ Đường tiêu hóa: Gây kích ứng miệng, hong, dạ dày. Xử lý bằng cách ngay lập tức gọi trung tâm cấp cứu hoặc bác sĩ. Không kích ứng gây nôn. Nếu nạn nhân nôn ói, giữ cho đầu thấp hơn để tránh hít vào.

XỬ LÝ THẢI BỎ:

Chai, lọ đựng chế phẩm không tái sử dụng lại.

Chai, lọ đựng chế phẩm và chế phẩm thừa hoặc chế phẩm hết hạn sử dụng được thu gom, thải bỏ theo quy định thải bỏ chất thải thông thường. Chế phẩm hết hạn sử dụng phải được pha loãng với nhiều nước trước khi đổ thải chung với hệ thống nước sinh hoạt.

Chai, lọ đựng chế phẩm và chế phẩm thừa hoặc chế phẩm hết hạn sử dụng được thu gom, thải bỏ theo quy định thải bỏ chất thải thông thường. Chế phẩm hết hạn sử dụng phải được pha loãng với nhiều nước trước khi đổ thải chung với hệ thống nước sinh hoạt.

BẢO QUẢN
- Bảo quản nhiệt độ thường, nơi thoáng mát (dưới 40°C), cách xa nơi có nhiệt độ cao, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 1 lít, can 3,78 lít, can 5 lít.

Số lô sản xuất: xem trên thân chai

Ngày sản xuất: xem trên thân chai

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. sử dụng trong vòng 75 ngày kể từ ngày mở nắp bình

Chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về sản phẩm:

CÔNG TY TNHH SG PHARMA

Số 55 đường S9, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: **0938066572**

Đơn vị sản xuất: **CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC – MỸ PHẨM GAMMA**

Số 201/21, đường Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: **0938066572**



**KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM**

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng